

PREempt® プリエンプト

加速化過酸化水素除菌洗淨剤

スポリサイダル RTU (原液使用タイプ)

ACCELERATED
HYDROGEN PEROXIDE
Patented



スポリサイダル

- **洗淨効果** 除菌効果のみならず高い洗淨力を発揮します
- **素早い接触時間** 除菌しにくい病原菌に対しても素早く現実的な清拭時間で効果を示す広域スペクトラム除菌剤
- **信頼できる** 環境表面、作業者及び施設利用者に対して安全です VOC (揮発性有機化合物) を放出しません
- **環境への配慮** 活性成分の加速化過酸化水素は水と酸素に分解し、活性残留物を生み出しません 環境への配慮が優れています

使用方法

硬質無孔表面の芽胞菌の除菌：

1. クロスや使い捨てワイプを使用して表面に本製品を塗布して下さい。
2. 芽胞菌の減弱効果を発揮するため、清拭後 10 分間自然乾燥させます。
3. 素材適合性に懸念がある表面に関しては、残留物を完全に除去するため十分にすすいで下さい。

※拭き方の目安：しっかり濡らして、10 分後には乾くようにします。通常の湿式拭きは 5 分後に 80%以上乾燥するため、いつもよりたっぷりと湿らせて拭いて下さい。

注意：ノックリティカルな環境表面にのみ使用してください。

本製品はクリティカル機器や医療機器に対する最終滅菌剤、もしくは高水準除菌剤ではありません。クロストリジウム・ディフィシル感染患者がいる硬質無孔表面の環境表面用スポリサイド洗剤（芽胞除菌洗淨剤）として使用して下さい。

体液で汚染されたその他のハウスキーピング環境表面の清掃

：フロア、フォーマイカ（耐熱合成樹脂）等
必ず適切な個人用保護具を着用して下さい。



1. 先に吸収剤（アブゾーベントパウダー、ペーパーウェスなど）で余分な体液を取り除きます。
2. 次にクロスまたは使い捨てワイプを使用して本製品を表面に塗布した後 1 分間そのままにし、汚染部位を除菌します。
コンタクトポイント（手指接触面）以外の床・壁・器具のハウスキーピング表面のバクテリア、ウイルス、真菌類は接触時間 1 分で減弱します。

除菌効果

スポリサイダル：接触時間 10 分

- ・クロストリジウム・ディフィシル（臨床分離株）
- ・クロストリジウム・スポロゲネス（ATCC7955）
- ・枯草菌（ATCC19659）
- ・バクテリアサイダル、ウイルスサイダル、ファンギサイダル：接触時間 1 分

芽胞菌の存在する環境の除菌洗淨に

陶器・プラスチック・ステンレスなど硬質で孔（小さな穴）の無い表面用 便器・尿器・洗面台・テーブル・椅子・ドアノブ等

商品名

プリエンプト スポリサイダル RTU

DIN 番号： 02451891

貯蔵期間： 2 年間

活性成分：加速化過酸化水素
4.5%

品番： 11701

サイズ： 1L ボトル

梱包形態： 1 ケース 12 本入

“加速化過酸化水素（AHP）”及び“プリエンプト”は、バイロックステクノロジー社の登録商標です。

【総輸入元】



東栄部品株式会社

本社 東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号
TEL 03 (3946) 8111(代) FAX 03 (3946) 8116



2770 Coventry Road, Oakville,
ON L6H 6R1 CANADA 1-800-387-7578