

清拭面積

アクセルプリベンションワイブは除菌洗浄剤の含浸量が一般的なウェットティッシュより多いため、清拭後も数分間湿った状態を保つことができ、細菌・ウイルスに十分に接触し効果的な**湿式除菌**が可能です。さらに1枚(160枚入/15×17cm)あたりの清拭可能面積も**2㎡**(VIROX社データ)と広く使用量や廃棄物の軽減につながり経済的です。ワイブの素材は、丈夫で汚れの吸着能力が**極めて高い**メルトブローン不織布を採用しています。ディスポタイプなのでクロスコンタミネーションを防ぐには最適です。

注意事項

- スプレーボトルで清拭する際は対象物に直接噴霧せず、清潔なドライワイブやクロスなどに噴霧して使用してください。
- 塩素系**の商品と一緒に使用すると塩素ガスが出て**危険**です。
- 取扱時および希釈作業時には手袋を着用し、状況に応じてマスクや保護メガネを着用してください。
- 濃縮タイプの原液使用や用途以外には使用しないでください。
- 目・顔など人体や食器、食品には使用しないでください。
- ワイブにはミシン目がありますので1枚分取り出し、蓋を押し付けながら1枚を切ってお取りください。
- ワイブは水に溶けないため、トイレには流さないでください。
- 直射日光や高温の場所は避け、清潔な場所に保管しお子様の手の届かないところに保管してください。
- 乾燥を防ぐため、使用後は必ず蓋を閉めてください。
- 医療機器は基本的に外装のみに使用(内部は使用不可)し、**使用前に必ず機器付属の「取扱説明書」を確認し**個別の注意事項があればそれに従ってください(不適合素材を使用している機器がある可能性があります)。

製品仕様



アクセルプリベンション
コンセントレート(3.8L)



アクセルプリベンションRTU
(1L)※スプレーガン別売



アクセルプリベンションワイブ
(左:60枚/右:160枚)



スプレーボトル
(希釈用/672ml)



スプレーガン緑
(アクセルプリベンションRTU 1L・
スプレーボトル用)



ポンプ(1oz・1/4oz)
※希釈計量用

商品名	商品コード	サイズ	内容	JANコード
VIROX アクセルプリベンション コンセントレート(3.8L)	VRX ACCPREVC4N	3.8 L	4本/1箱	4518319090217
VIROX アクセルプリベンション RTU(1L)	VRX ACCPREVR1	1L	12本/1箱	4518319090040
VIROX アクセルプリベンション ワイブ(60枚)	VRX ACCPREVW-10x10	25x25cm/1枚	12個/1箱	4518319090071
VIROX アクセルプリベンション ワイブ(160枚)	VRX ACCPREVW-6x7	15x17cm/1枚	12個/1箱	4518319090064
TOLCO スプレーガン緑	TLC 110248	—	—	—
TOLCO スプレーボトル	TLC 120119	672ml	—	—
TOLCO ポンプ(1oz)	TLC 160100	1oz (28ml)	—	—
TOLCO ポンプ(1/4oz)	TLC 160109	1/4oz (7ml)	—	—

teccs 東栄部品株式会社

<http://www.teccs-jp.com>

〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目3番6号

本 社 / TEL 03-3946-8111 大 阪 / TEL 06-6451-2871

名古屋 / TEL 052-331-6791 札 幌 / TEL 011-271-3618

福 岡 / TEL 092-434-3911

お問い合わせ



加速化過酸化水素 アクセルプリベンションシリーズ ACCELE PREVENTION SERIES

日本 カナダ 特許取得

医療・福祉・教育施設の環境整備に最適な
洗浄と除菌が一度で可能な除菌洗浄剤

Hospital Disinfectant Cleaner



PREvention™



東栄部品株式会社

アクセルプリベンション

加速化過酸化水素(Accelerated Hydrogen Peroxide)

0.5%加速化過酸化水素(AHP)は、『手術医療の実践ガイドライン(改訂版)』、『医療施設における消毒と滅菌のためのCDCガイドライン(2008)』に記載されています。

本製品はカナダ保健省(DIN)の承認を受け、同等成分が米国環境保護局(EPA)の承認を取得しています。

AHPは、最新のUSP(米国薬局方)で示された、調剤環境の衛生基準と危険薬の除染基準を満たしており、混合無菌製剤や抗がん剤毒性の調剤環境における洗淨分解剤として有効な除菌洗淨剤と証明されています。

また、NASA(アメリカ航空宇宙局)が国際宇宙ステーションの除菌洗剤として2018年4月に承認しました。

アクセルプリベンション
コンセントレート

ACCELE PREVENTION CONCENTRATE

日常清掃から
血液汚れまで

希釈用
希釈率/1:32~128
有効活性成分
6%AHP
3.8L

アクセルプリベンション
RTU

ACCELE PREVENTION RTU

希釈操作なしで
すぐ使える

希釈不要
有効活性成分
0.5%AHP
1L

アクセルプリベンション
ワイプ

ACCELE PREVENTION WIPE

拭くだけで
除菌洗淨

清拭用ワイプ
有効活性成分
0.5%AHP
60枚/160枚

特徴1 証明された優れた除菌力と接触時間

(製造元VIOX社のカナダ保健省への登録データより)

微生物不活性化	接触時間
広域スペクトラムサニタイジング	30秒
バクテリア除菌テスト	3~5分
ウイルス(エンペローブ)除菌テスト	3~5分
ウイルス(ノンエンペローブ)除菌テスト	3~5分
ファンギ除菌テスト	3~5分
マイコバクテリア除菌テスト	3~5分

※1 サスペンションテスト(室温0.1%、AHPを接触時間30秒)
※2 定量的キャリアテスト(QCT)(5%ウシ血清土壌負荷、室温3分または5分)による微生物テスト 広域スペクトラム除菌率99.9999%以上

特徴2 高い洗淨作用

米国試験材料協会テスト ASTM D-4488 クリーニング効果
クリーニング効果70%以上を以て政府検査基準で洗剤とみなされます。

成分	効果率
加速化過酸化水素	94.74%
第四級アンモニウム塩	
次亜塩素酸ナトリウム	
蒸留水	

特徴3 人体・環境への安全性と非残留性

- 加速化過酸化水素(AHP)は有機物と反応後、水と酸素に分解し、環境表面に残留しません。
- 非腐食性、非刺激性、無毒性。揮発性有機化合物(VOC)を含まないことが証明されています(オーテック・ラボ社、ニュクロテクニクス社のデータより)。
- Eco Logo(エコロゴ)取得による環境配慮をより追求しています。

特徴4 様々な素材に使用可能

様々なプラスチック素材や金属(銅など一部金属を除く)に使用できます。床に塗布されているワックスを傷めません。

不適合素材の詳細については、別紙文書に記載されておりますのでお問い合わせください。

材質	判定	材質	判定
ナイロン	○	シリコン	○
ポリプロピレン	○	レーヨン	○
天然ゴム	○	セラミック	○
スチール	○	アセタール樹脂※	×
アルミニウム	○	赤銅・青銅	×
合成皮革	○	真ちゅう	×

※医療機器内部の部品に使用されている場合があります

成分

加速化過酸化水素(AHP)とは、カナダのVIOX社の独自特許技術により開発された成分であり、従来の過酸化水素(オキシドール)の難点であった除菌スピードの遅さを**加速的に高め**、かつ界面活性剤を混合することにより洗淨能力も合わせ持つ除菌洗淨剤として開発されました。CDCガイドライン区分による**医療機器表面(外装)**、**ハウスキーピング表面の洗淨と除菌**に最適な環境表面用除菌洗淨剤です。また、加速化過酸化水素は、EPAが定めるDfE基準(環境適合設計: Design for Environment)の承認を受けています。確かな洗淨、除菌能力を持ちながら、環境に非常に配慮した成分として認められました。アクセルプリベンションシリーズは、厳格な環境基準認証である「ECO LOGO(エコロゴ)」を取得しています。

▲エコロゴ

用途

使用エリア別 区分表	使用方法	高頻度接触面		医療機器	リハビリ	床	血液・体液で汚染された部分	水回り
		テーパー・キャビネットなど ドアノブ・ナースコール・椅子・ 手指の接触部分・モバイル	薬品調剤テーブル・など 病棟外来・ナースステーション・ 機器外装(※1)・ 電気コードなど タッチパネル・	塗装済み木工品など プラスチック・ リハビリ用器材・	手術室・ICUなど 病棟・外来・トイレ・水回床	トイレ・浴室・洗面所	芽胞菌で汚染された場合(※2)	
アクセルプリベンション コンセントレート	希釈倍率 1:32	○	○	○	○		○	○
	希釈倍率 1:128					○	○	※3
アクセルプリベンションRTU	原液使用	○	○	○	○		○	○
アクセルプリベンションワイプ	ワイプ	○	○	○	○		○	○

※1 医療機器は基本的に外装のみに使用(内部は使用不可)し、事前に機器付属の取扱説明書や情報文書を必ず確認してください(不適合素材を使用した機器がある可能性もあります)。機器表面に直接スプレーはしないでください。必ず清拭するマイクロファイバークロスなどにスプレーして拭き上げます。

※2 芽胞菌の除染・除菌には別のAHPシリーズ「プリエンプト」が対応します。

※3 大量に床にこぼれた血液などのモッピングや機械洗淨には1:128(水10Lに40ml)。

使用期限

開封、未開封に関わらず製造から**2年間**使用可能です。製品ラベルに使用期限が記載されています。アクセルプリベンションワイプは開封後ワイプが乾燥しなければ、製造より2年間は使用可能ですが、開封後はできるだけ1年以内に使用してください。

安定性

アクセルプリベンションコンセントレート(3.8L)は水で希釈した場合、希釈液は**4週間**効果が持続し使用可能です。その後も洗淨力は持続します(一般的な次亜塩素酸ナトリウムは希釈後24時間で減弱し効果が低下します)。